



為您介紹 Petspemf 脈衝電磁場寵物墊

什麼是 Petspemf 脈衝電磁場寵物墊？

Petspemf 脈衝電磁場寵物墊是一種非藥物性的抗炎脈衝電磁場 (PEMF) 設備。脈衝電磁場 (PEMF) 科技已被科學證明可以減輕動物的疼痛和炎症，而不會產生不良影響。用於動物的脈衝電磁場 (PEMF) 療法是一種安全及有效的科技，可以用作獨立治療或與配合其他治療結合使用。

脈衝電磁場如何運作？

寵物細胞的每一項功能，無論是有意識的、無意識的、精神的還是身體的，都需要電流才能發生。

脈衝電磁場 (PEMF) 技術使用電磁脈衝以非侵入性的頻率溫和地刺激及平衡細胞功能。由於整個寵物的身體都是電化學器官 (electrochemical organs)，所以可以受到安全的低電磁頻率影響。

如今，PEMF 技術已用於治療手術後疼痛、水腫、骨關節炎、焦慮、抑鬱、慢性傷口、關節炎和許多其他疾病。越來越多來自世界各地的臨床證據都支持脈衝電磁場 (PEMF) 療法對人類和動物都非常有效。

脈衝電磁場 (PEMF) 設備已獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 的批准及認可，可以用於治療不癒合骨折 (non-union fractures)，並可用於治療：

- 術後疼痛和水腫、
- 骨關節炎、
- 足底筋膜炎。

Petspemf 脈衝電磁場寵物墊有哪些建議使用的治療方案？

Petspemf 脈衝電磁場寵物墊有「止痛」、「舒緩壓力」及「加速康復」三項不同模式。

- 止痛模式 - 建議每日療程時長為 30 分鐘，治療應持續到沒有需要為止。您可以將墊子放於受影響的部位上，或者可以讓動物躺在墊上，將其當作脈衝電磁場床墊使用。
- 加速癒合模式 - 建議每日治療時長為 30 分鐘，治療應持續到沒有需要為止。您可以將墊子可以放在傷口或受影響的部位上，或者可以讓動物躺在墊上。
- 舒緩壓力模式，建議每日治療時長次數最多 3 次，每次時長 20 分鐘，治療應持續 1-2 週。墊子可以放置在動物的神經叢（腹部、全身或頭部，也可以讓動物躺在墊上。

不同的 Petspemf 預設程式

不同的預設程式	建議的治療方案
<p>Pain Relief 止痛</p> <p>通過在墊子內部巧妙放置的線圈，當寵物躺於墊子上時，其身體每一個部位都會接受到電磁的刺激。刺激會幫助緩解疼痛，並會促進身體的自然恢復。</p>	<p>頻率：50.6Hz 和 15.2Hz 強度：2.5mT 和 1mT 位置：放於患處上方 持續時間：30分鐘 治療：每日重複使用，直到沒有需要為止</p>
<p>Accelerated Healing 加速癒合</p> <p>加速癒合程式可減少炎症和疼痛，並加快寵物的癒合時間和再生速度。其他臨床證據也支持使用脈衝電磁場作為術後治療，促進傷口和組織癒合。</p>	<p>頻率：15.2Hz 和 40.5Hz 強度：2.5mT 和 1mT 位置：放於患處或傷口上方 持續時間：30分鐘 治療：每日重複使用，直到沒有需要為止</p>
<p>Stress Relief 舒緩壓力</p> <p>舒緩壓力程式可以用於情緒緊張、容易恐慌、患有創傷後遺症及需要協助才能獲得平靜的寵物身上。這個程式會令它們產生生理變化，幫助牠們在分子水平上為細胞提供能量，從而增加大腦供氧並增加血流量。</p>	<p>頻率：4Hz 和 6Hz 強度：2.5mT 和 1mT 位置：神經叢（腹部）、全身或頭部 持續時間：30分鐘 治療：第1週：每日3次，每次20分鐘；之後2週：每週 1-2次，每次20分鐘</p>

Petspemf 脈衝電磁場寵物墊的有效運作距離是多少？

為了獲得最佳效果，寵物可以直接躺於 Petspemf 脈衝電磁場寵物墊的上面，或者盡可能將身體靠近墊子。越靠近線圈，頻率會越強烈；離開線圈越遠，頻率便會越弱。Petspemf 脈衝電磁場寵物墊的有效使用距離可達15厘米或6英寸。

如何選擇合適的脈衝電磁場設備？

我們已經對不同類型的寵物脈衝電磁場設備進行了真實的比較，省略了各品牌的名稱。雖然所有脈衝電磁場設備都有相似的優勢，但不同脈衝電磁場設備中不同的產生規格及技術都必須得到科學的支持。因此，脈衝電磁場設備的頻率、強度和使用位置都應伴隨著相應的研究。

	 Petspemf 脈衝電磁場寵物墊	其他設備		
		其他脈衝電磁場墊	針對局部的脈衝電磁場設備	高強度脈衝電磁場設備
可以幫助緩解慢性疼痛，放鬆情緒或幫助傷患恢復。設備舒適及操作簡單十分	寵物可以躺於墊上面	寵物可以躺於墊上面	否	寵物可以躺於墊上面

應用	重。				
強度	刺激組織的電荷量與磁場強度是成正比的。所有的頻率和強度都應該得到研究的支持。	25 高斯	0,05 - 1 高斯	0,05 -1 高斯	大於 250/500 高斯
治療	脈衝電磁場通常用於治療疼痛、關節炎、炎症、僵硬和傷口。減輕許多老年寵物經歷的疼痛和不適。	是	是	是 只能使用於身體的局部地區	是
設備的充電	電池可充電，無需額外費用	是	是/否 有些墊有可更換電池	否 使用次數有限	是
程式	範圍廣泛的程序。所有的項目都應該有科學支持。	3 個	3 個	1 個	通常只有 1 個
操作簡單	對於家用設備，設備操作簡十分重要	是	是	是	否

Petspemf 脈衝電磁場寵物墊和 Assisi Loop 有什麼分別？

兩個產品都使用相同的技術，Assisi loop 和 Petspemf 脈衝電磁場寵物墊之間的區別如下：

- Assisi loop 提供有針對性的脈衝電磁場 (tPEMF) 治療，針對身體一個部位。Petspemf 脈衝電磁場寵物墊則使用 5 /6 線圈（小墊/大墊）為寵物的全身提供脈衝電磁場治療。
- Assisi loop 需要寵物主人的協助下使用。許多寵物都很喜怒無常，它們會走動、咬東西等。Petspemf 脈衝電磁場寵物墊的設計可以讓動物躺在墊上面、抓、咬或睡覺，都不會造成任何危險。
- Assisi loop 的電池容量有限，只能進行 150 次15分鐘的治療，建議您在兩次治療之間休息 2 小時。Petspemf 脈衝電磁場寵物墊有一個可充電電池，可以無限次使用。
- Petspemf 脈衝電磁場寵物墊擁有 25 項科學研究的支持，外套由防刮擦材料製成。它還有一個防水內套，使線圈保持乾燥，確保該設備可以在所有髒亂和濕水的情況下工作。

Infiniti-C Limited

Unit 1405A, 14/F Block A, Goodview Industrial Building, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong

Tel: +852 2986 6686 Fax: +852 2986 6676 Whatsapp: +852 6588 9618

Email: info@infiniti-c.co