

首次使用 PETSPEMF 墊需知



1. 充電

請為 Petspemf 墊充電，直至橙色指示燈消失。當 Petspemf 墊插入 USB 充電插時同時可以為設備解鎖。



2. 下載應用程式

於 iOS App Store 或 Google Play Store 下載 Petspemf 的應用程式到您的手機裝置或平板電腦。



3. 啟動應用程式

點擊應用程式內的「開始 START」按鈕並接受使用條款。確保手機裝置上的藍牙已開啓，並按照逐步使用者指南進行操作。

搜尋 Petspemf 



4. 喚醒設備

用手指連續拍打控制盒兩次以喚醒設備（控制盒會振動兩次表示確認），此時設備已準備好使用。



5. 連接

點擊應用程式中的「連線 CONNECT」按鈕，然後等待 Petspemf 墊與您的手機裝置配對。



6. 開始療程

選擇好治療模式後，選擇使用時長，療程將會開始（控制盒會振動一次表示療程已經開始）。如果需要中斷療程，請點擊應用程式中的「停止 STOP」按鈕或用手指連續拍打控制盒兩次（控制盒會振動兩次表示確認）。

7. 藍牙連接

無需在手機或平板電腦的藍牙設定內預先配對設備 - Petspemf 設備只需要透過啓動應用程式便可以進行連接，並會於一段時間後自動中斷連接以節省手機電池。

如何使用試管聆聽脈衝的聲音

使用試管非常簡單。您需要遵循以下三個步驟：

1. 選擇「止痛 Pain Relief」模式，因為其頻率最容易被聽到
2. 將試管的玻璃端緊貼放在線圈區域上方
3. 將耳朵放在試管的銀色蓋上去聆聽脈衝的聲音

當試管中的磁鐵對產生的磁場產生反應時，您會聽到 Petspemf 墊線圈發出的電磁脈衝的頻率。聲音應該是非常微弱，沒有任何明顯的噪音，並且應該產生嗡嗡聲，而不是劇烈的咕咕聲。試管中的磁鐵會保持靜止，不會跳躍或上下晃動。

大墊的線圈位置



把你的耳朵放在銀色蓋上



小墊的線圈位置

不同顏色的指示燈代表什麼？



1. 紅燈

紅燈閃爍：電池電量低，您需要為設備充電。



2. 橙燈

橙燈閃爍（每秒閃爍 1 次）：Petspemf 墊已透過藍牙® 連接到您的手機。
橙燈長亮：Petspemf 墊正在充電，USB 充電插頭已插入。



3. 綠燈

綠燈閃爍（每秒閃爍 1 次）：所選的治療模式正在執行。
綠燈慢閃（每 5 秒閃爍 1 次）：Petspemf 墊處於待機狀態；USB 充電插頭已拔出。



4. 沒有燈

充電時燈不亮：Petspemf 墊已充滿電。



Petspemf Pad 設備
中港澳、星馬地區授權分銷商

電話：+852 2986 6686
Whatsapp: +852 6588 9618
網站：www.infiniti-c.co
電郵：info@infiniti-c.co

如需其他協助請聯繫我們



在 Petspemf，我們努力為客戶提供最好的支援。如果您需要進一步協助，請造訪我們的支援頁面 petspemf.com/support 或直接透過 foryou@petspemf.com 與我們聯絡。我們隨時為您提供協助！